




Счастливая жизнь и  
превосходное здоровье

Инструкции по применению массажного аппарата  
для глаз «Лэфань»  
Перед использованием продукции внимательно ознакомьтесь с  
инструкцией и сохраните ее.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ


- Описание функций кнопок

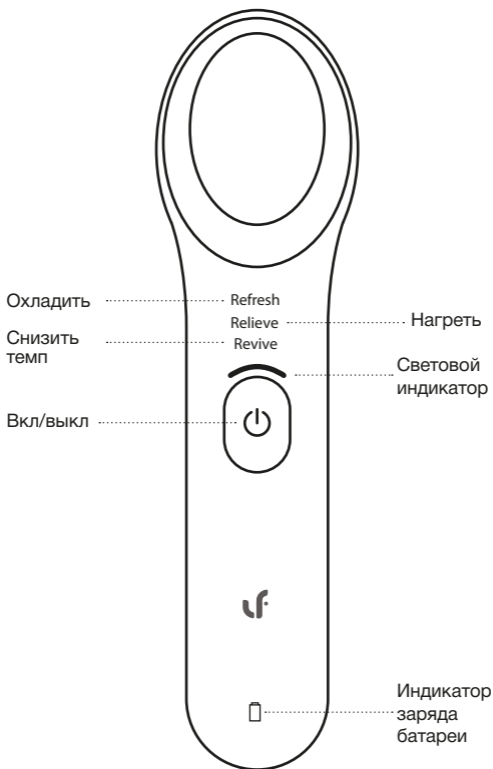

**\* Кнопка Вкл/выкл: длительное нажатие 1 секунда -включение, короткое нажатие для переключения режимов работы.**

1. Режим зарядки: При подключении USB-кабеля продукция начинает заряжаться, на что указывает мигающий зеленый индикатор зарядки. При постоянно горящем индикаторе – аппарат заряжен
2. Предупреждение о низком заряде батареи: Индикатор зарядки мигает в течение 30 секунд, когда аккумулятор находится на низком уровне, и автоматически выключается после короткого звука в течение 1 секунды, чтобы предупредить пользователя о своевременной зарядке. Включение питания при низком энергопотреблении – после мигания светодиодного индикатора в течение 5 секунд и звукового сигнала, аппарат выключается.

- Аксессуары

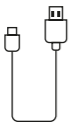

Провод для зарядки



Чехол



Инструкция

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ



Движение при холодном и горячем массаже



Движение при высокочастотном вибрационном массаже



## **Освежающий (холодный) режим – снятие отеков глаз**

Включите режим Refresh (Охладить), индикатор загорится синим, аккуратно поместите металлическую головку перед глазным яблоком и массируйте. Через 15 секунд металлическая головка охладится до постоянной температуры около 18 °С. Уход за глазами. После установления постоянной температуры, время ухода за каждым глазом составляет около 60 секунд.



## **Согревающий режим – снимает усталость глаз**

Включите режим Relieve (Нагреть), индикатор загорится синим, аккуратно поместите металлическую головку перед глазным яблоком и массируйте. Через 15 секунд металлическая головка нагреется до постоянной температуры около 39 °С. Уход за глазами. После установления постоянной температуры, время ухода за каждым глазом составляет около 120 секунд.



## **Медленный темп – снимает круги под глазами**

Включите режим Revive (Снизить темп), после того, как поочередно замигает белый, слегка положив металлическую головку на глаз, медленно вращайте. После постоянной температуры цикл холодного и горячего цикла установлен на 240 секунд, а металлическая головка ухода за глазами будет чередоваться в течение 120 секунд и в течение 60 секунд. После двух звуковых подсказок «капель» белый свет замигает поочередно, указывая что можно перенести аппарат на второй глаз, после белый свет будет гореть постоянно в течении 120 секунд, а потом аппарат автоматически выключается.

**Совет:** При использовании трех режимов не давите на глазные шарики, чтобы избежать визуального размытия после использования, рекомендуется, чтобы 30 секунд после процедуры пользователь оставлял глаза закрытыми.



## **Высокочастотный массаж способствует кровообращению глаз**

При включении питания используйте массажный силикон на задней части продукции, чтобы коснуться кожи, автоматическая индукция открывает высокочастотный режим массажа, мягко массируйте вдоль орбиты глаза, рекомендуется использовать монокуляр в течение 30 секунд, массажный силикон автоматически отключается после прекращения контакта с кожей. Данный высокочастотный массаж также может использоваться для массажа лица в других местах, кроме глаз.

## ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦИИ



Наименование продукции:  
массажный аппарат для глаз «Лэфань»  
Модель: LF-ME001  
Размеры: 180мм x 48мм x 34,5мм  
Вес (без упаковки): 160±5г  
Напряжение: 5В  
Номинальная мощность: 6 Ватт

## РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

### **Вопрос: Продукция не заряжается?**

Проверьте, правильно ли подключен кабель USB к продукции и исправен ли порт USB.

### **Вопрос: Продукция не работает?**

Пожалуйста, проверьте, заряжен ли аппарат, если продукция включена, но не работает, пожалуйста, свяжитесь с центром послепродажного обслуживания «Лэфань»; чтобы предотвратить ожоги при высокой температуре, во время использования, когда температура металлической массажной головки превышает 45°C, индикатор будет мигать сразу тремя цветами (синим, белым, зеленым) в течение 2 секунд, после система перейдет в безопасный режим и автоматически выключится.

### **Вопрос: Металлическая головка и силиконовый массажер стали грязными?**

Используйте спирт или влажную ткань, чтобы очистить металлическую головку и силиконовый массажер.

### **Вопрос: Интересно, подходит ли данная продукция для моих глаз?**

Не используйте данную продукцию на влажной, потрескавшейся коже или при открытых ранах, а также при заболеваниях глаз, аллергии или инфекциях глаз. Если у Вас когда-либо были какие-либо операции на лице/глазах, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.

### **Вопрос: Силиконовый массажер не вибрирует при контакте с глазами?**

Из-за различий в климате и коже, чувствительность аппарата может отличаться. В таких случаях слегка надавите на массажер.

# ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подвергайте продукцию влаге.
- «Лэфань» рекомендует использовать аппарат до 3 раз в день, чтобы избежать раздражения кожи и глаз.
- Неправильное использование продукции во время ухода за больными может привести к повреждению глаз, у некоторых, может быть нечеткое зрение после открытия глаз
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данной продукции, если у Вас были операции на лице/ глазах, проходили косметические процедуры или есть имплантат.
- Если у вас есть контактные линзы, рекомендуется удалить контактные линзы перед использованием продукции.
- Аппарат имеет нагревающуюся поверхность. Люди, которые не чувствительны к температуре, должны быть осторожны при использовании.

В целях соблюдения законов и нормативных актов Китайской Народной Республики и других требований, касающихся ограничений на опасные вещества в электронике, Компания классифицирует опасные вещества в настоящем продукте по компонентам следующим образом:

## Название и содержание вредных веществ в продуктах

Наименование частей	Свинец	Золото	Кадмий	Шестивалентный хром	Полибромдифенил	Полибромированные дифениловые эфиры
Черный резистор	X	○	○	○	○	○
Диод	X	○	○	○	○	○

Настоящая таблица составлена в соответствии с положениями SJ/T11364.

○ Указывает, что содержание вредного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельного уровня, установленного стандартом GB/T 26572.

X Указывает, что содержание вредного вещества, по крайней мере, в одном из однородных материалов компонента, превышает предельное количество, установленное GB/T 26572 (Примечание: Позиция, обозначающая «X» в таблице, представляет собой медный сплав, в котором свинец в настоящее время временно не может быть заменен или уменьшен по техническим или экономическим причинам.)

Данный знак обозначает срок использования продукции и ее компонентов, которые будут маркироваться отдельно, когда некоторые компоненты имеют различные ограничения при использовании (например, модуль батареи будет иметь другой логотип).

Документ относится к электронике, импортируемой или продаваемой на территории КНР.

# ТРИ ПАКЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ

## Правила гарантии

В течение одного года с момента подписания вы можете воспользоваться бесплатными услугами по техническому обслуживанию, если у вас возникли проблемы с качеством при обычном использовании массажного аппарата.

## Не гарантийные случаи

- Срок обслуживания превысил 3 гарантийных случая;
- Самостоятельный разбор или изменение продукции;
- Ущерб, причиненный в результате форс-мажорных обстоятельств;
- Сбой работы продукции по вине человека.

## Гарантийный талон

Модель продукции	
Название продукции	
Дата покупки	
Номер счета-фактуры	
ФИО Клиента	
Контактный телефон	
Место покупки	
Адрес	

\* Настоящая форма применяется в соответствии с тремя пакетами гарантийного обслуживания продукции. Данная гарантийная карта эквивалентна сертификатам на три пакета гарантийного обслуживания.

Производитель:

Адрес:

Сайт: [www.lfwellness.cn](http://www.lfwellness.cn)

Горячая линия: 400-101-8969